

MÁSCARA DE PROTEÇÃO

FOLHETO INFORMATIVO

ÂMBITO COVID-19



PP TÊXTEIS LDA

Edifício Filadélfia, Fração N R. Sra. Dos Milagres * 4815-445 Vizela
PORTUGAL

PRODUTO



REF. PPMASKV02

INSTRUÇÕES USO

MÁSCARA TÊXTIL SOCIAL REUTILIZÁVEL

NÍVEL
3

Máscaras têxteis destinadas à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional ou nas saídas autorizadas em períodos de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.

N.º LOTE | MÊS | ANO DE FABRICO: 372-2020-35401 | ABRIL | 2020

- Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.
- A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:
 - 1) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
 - 2) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
 - 3) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
 - 4) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
 - 5) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - 6) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - 7) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
 - 8) Em momento algum, a máscara deve ser guardada à volta do pescoço para ser reutilizada;
 - 9) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
 - 10) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.
- A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir o número de ciclos de lavagem indicados pelo fabricante.
- A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem.
- A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação (inicialmente ou após lavagem).

MÁSCARA DE PROTEÇÃO

FOLHETO INFORMATIVO

ÂMBITO COVID-19

INSTRUÇÕES USO


- A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.
Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.
- No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto “conservação e limpeza” e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.



MATÉRIAS PRIMAS

Tecido 100% Poliéster (2 folhas exteriores)
Não tecido 50% Poliéster / 50% Poliamida (2 camadas interiores máscara)
Elastico
Peça metal: Ponte de nariz flexível

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

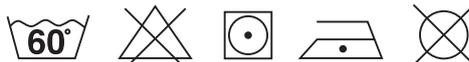

PACKAGING

Pack de 10 unidades

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização.
O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.

- **CONFORMIDADE VERIFICADA ATRAVÉS DO RELATÓRIO**



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



citeve

TECNOLOGIA TÊXTIL



MÁSCARAS
COVID-19
APROVADO

17263/2020 CITEVE

Esta declaração de conformidade,
emitida de acordo com o documento
“**Máscaras destinadas à utilização no âmbito
do COVID-19 - Especificações Técnicas**”
publicado pela **DGS, INFARMED, ASAE e IPQ**
a 14 de abril de 2020 e baseada no relatório
de ensaio nº**17263/2020** emitido pelo CITEVE,
autoriza a empresa

**P.P.- SERVIÇOS E COMÉRCIO TÊXTIL,
UNIPESSOAL, LDA.
RUA SENHORA DOS MILAGRES
EDIFÍCIOFILADÉLFIA- SÃO JOÃO
4815-445- CALDAS DE VIZELA**

50 LAVAGENS USO GERAL (NÍVEL 3)

**a utilizar o selo “Máscaras COVID-19 Aprovado”
para o seguinte artigo:**

PPMasKV02

Os resultados dos ensaios realizados comprovam
que o artigo cumpre os requisitos relativos à respirabilidade
e capacidade de filtração de partículas para máscaras
utilizadas no contexto do **COVID-19**.

Nível 3 - Máscaras de Uso Geral

Número de lavagens: 50



Esta máscara destina-se a servir como proteção complementar às medidas de distanciamento social,
fundamentais para controlo da COVID-19.

Estas máscaras não poderão ser utilizadas por profissionais de saúde no exercício das suas funções. Assim,
não sendo um dispositivo médico, não cumprem o regulamento das máscaras cirúrgicas (Regulamento
UE/2017/745), nem sendo um EPI, não cumprem o Regulamento UE/2016/425.

O beneficiário desta declaração está obrigado, através da assinatura da declaração de compromisso,
a utilizar a marca COVID-19 somente em produtos que estejam em conformidade com a amostra ensaiada.

Vila Nova de Famalicão, **23.10.2020**

O Director dos Laboratórios
Maria Antónia Lopes

Anexo à Declaração de Conformidade

Annex to the Declaration of Conformity



Este anexo completa a Declaração de Conformidade emitida de acordo com o documento “Máscaras destinadas à utilização no âmbito do COVID 19 - Especificações técnicas” de forma a evidenciar que os ensaios realizados no CITEVE comprovam que o artigo está em conformidade com CWA 17553, documento emitido pelo CEN European Committee for Standardization.

This annex completes the Declaration of Conformity issued in accordance with the document “Masks intended for use within the scope of COVID 19 - Technical Specifications” in order to show that the tests carried out at CITEVE prove that the article is in compliance with CWA 17553, document issued by the CEN European Standardization Committee.

Vila Nova de Famalicão, **23.10.2020**

A handwritten signature in blue ink that reads 'Antónia'.

O Director dos Laboratórios
The Director of Laboratories
Maria Antónia Lopes

Function Antimicrobial effects

Designation 000000070A

Application Knit/Woven/ Non Woven – PES / PA/ CO

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

OBS

Washing Resistant

Up to 50 washes
99% Efficiency

Antimicrobial Effect

Odor control effect

Durable fresh effect

Bio Based

Bluesign

OEKO-TEX

II – IV

Free of perfluorooctanoic acid (PFOA*), perfluorooctane sulfonic acid (PFOS*) and alkylphenol ethoxylate (APEO)

As the mentioned characteristics are influenced by the substrate (fabric), it is necessary to validate it with tests after application.

Date:
08-05-2020

Signature:
Paula Ferreira

1/1

MÁSCARA DE PROTEÇÃO

FOLHETO INFORMATIVO

ÂMBITO COVID-19


ESQUEMA DO PRODUTO

ADULTO

1	LARGURA	17,5CM
2	ALTURA	10 CM
3	AJUSTE	8,5CM
4/5/6	PREGAS	1CM
7	ELÁSTICO	18CM

CRIANÇA

1	LARGURA	15,5CM
2	ALTURA	7,5CM
3	AJUSTE	8,5CM
4/5/6	PREGAS	1CM
7	ELÁSTICO	18CM

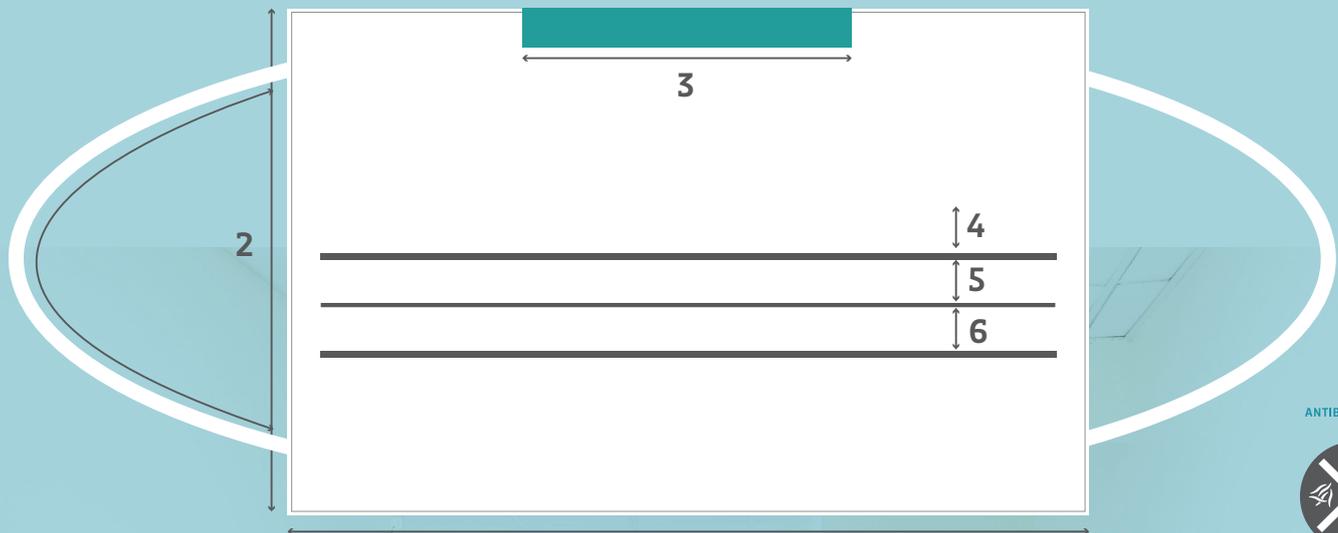

ANTIBACTERIANO



ELÁSTICO



AJUSTE
PONTE NARIZ



4 CAMADAS
PROTECTORAS



LAVÁVEL




MÁSCARA DE PROTEÇÃO

FOLHETO INFORMATIVO
ÂMBITO COVID-19

FOTO MÁSCARA DE PROTEÇÃO

FRENTE

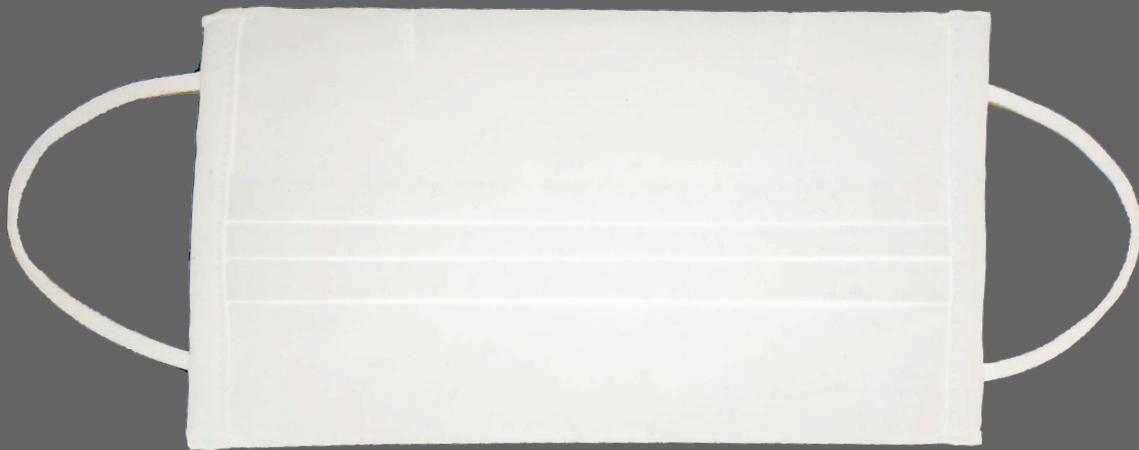

4 CAMADAS
PROTETORAS





**TODOS JUNTOS
PARA O BEM DA HUMANIDADE**

#tudovaiifcarbem

PP TÊXTEIS LDA

Edifício Filadelfia, Fração N R. Sra. Dos Milagres * 4815-445 Vizela
PORTUGAL

www.pptexteis.com * geral@pptexteis.com * tel.: (+351) 253 069 660